

Polar Wrap Application

Distributed by



TopShelf Orthopedics
Tracy, CA 95304

Phone: 866.592.0488

Fax: 209.834.8832

P/N 025136 Rev C



WARNING

The Polar Pad can be cold enough to seriously injure the skin. Follow these instructions and the Operating Instructions and Product Inserts provided with the Polar Care motorized cold therapy units (available at www.topshelfortho.com or 1-866-592-0488).



POLAR WRAP APPLICATION

- 1 Remove hook and loop squares from the foam wrap. Peel protective film from squares and secure adhesive sides together.
- 2 Attach hook side of squares to blue foam on Polar Pad. Repeat process until all squares have been used.
- 3 Attach the Polar Pad to the inside of the Polar Wrap. Position the pad to cover the traumatized area of the body when the wrap is applied to the patient.
- 4 Secure the wrap with the pad to the patient.
- 5 Trim the wrap to fit if needed.

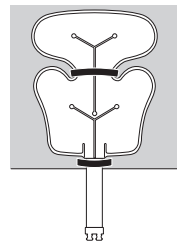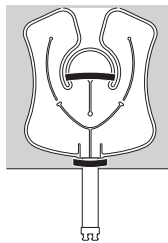

CAUTION: DO NOT PUNCTURE THE PAD

Colocación Del Polar Wrap (ENVOLTURA POLAR)



ADVERTENCIA

La Almohadilla Polar puede estar lo suficientemente fría como para lesionar gravemente la piel. Siga estas instrucciones y las Instrucciones de funcionamiento y Prospectos del producto proporcionados con las unidades Polar Care de terapia fría de flujo continuo (disponible en www.topshelfortho.com or 1-866-592-0488).



COLOCACIÓN DE POLAR WRAP (ENVOLTURA POLAR)

- 1 Remueva los cuadros de ganchos y vueltas de la envoltura de espuma. Desprenda la capa protectora de los cuadros y pegue los dos lados adhesivos.
- 2 Ate el cuadro de ganchos a la espuma azul en la Almohadilla Polar. Repita el proceso hasta que todos los cuadros sean usados.
- 3 Ate la Almohadilla polar al interior de la Envoltura polar. Coloque la almohadilla para cubrir el área afectada cuando se coloque sobre el paciente.
- 4 Ajuste la envoltura con la almohadilla al paciente.
- 5 Recorte la envoltura si es necesario.

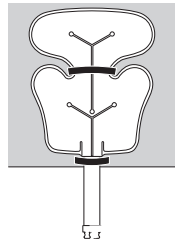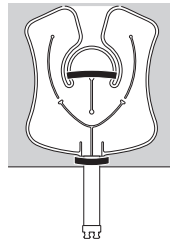

PRECAUCIÓN: NO PERFORE LA ALMOHADILLA.